



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

CellSonic™ Ltd fabrica el **CellSploder** para tratamiento de enfermedades causadas por bacterias, hongos o virus en una superficie; ejemplo caries, pie de atleta, Verruca o MRSA. **CellSploder** emite iones negativos a la superficie contaminada matando los gérmenes o bacterias depositadas allí. **CellSploder** es un equipo simple, confiable y seguro.



El tratamiento es eficaz, sin dolor al paciente, no invasivo y rápido. No se conocen efectos colaterales peligrosos. La consola contiene un sistema electrónico que genera 19,000 voltios, con un límite de corriente de 100 microamperios. La energía producida es absolutamente segura; 1 centésimo de lo que es considerada tolerable para una persona.

La aplicación del tratamiento es simple, se limpia el área afectada, el pico de la pieza de mano se apunta hacia el área afectada y se descarga el flujo de iones sobre esa área. La aplicación acaba con la causa del problema. En algunos casos de afecciones de piel se puede necesitar más de un tratamiento.

iSi no es CellSonic™ es caro!

CellSonicAmericas

1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida 33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
cellsonicamericas@bellsouth.net
Skype ID gva1936

Representante:



CellSonic

CellSonic™ Ltd.

Hauptstrasse 16, CH-3186 Düringen, Switzerland
Registered number CH-217-3540042-9

www.cellsonic-medical.com

www.cellsonic-beauty.com

Recomendaciones

Tratamiento	Duración	No. de aplicaciones	Preparación
Pie de Atleta	2 minutos		
Caries –lesiones Dentales	2 minutos		La parte blanda de la lesión caries debe ser removida y el área lavada y secada.
Ulceras	1 minuto por cm ²	3 a 4	
Hongos Uñas	Entre 15 a 40 minutos	Semanalmente hasta 3 veces	Se debe raspar para remover la superficie lesionada de la uña y después tratar
Verrugas pequeñas	5 minutos	1	
Verrugas, grandes	5 minutos	Semanalmente hasta 6 veces	Se deben rebajar a lo mínimo posible antes de tratar sin sangrar. Si sangra, no se debe aplicar el tratamiento.

¡Si no es CellSonic™ es caro!

CellSonicAmericas
1790 West 49th Street S.305-12
Hialeah, Florida 33012
305 559 0842- 305 608 3622 (Cel)
Skype ID gva1936
cellsonicamericas@bellsouth.net